

■ 製品仕様



品番	574000
商品名	能動型下肢用他動運動訓練装置 ARTROMOT-K1
1箱入数	1セット
セット内容	本体/1台、リモコン/1台、電源コード/1本

販売名	能動型下肢用他動運動訓練装置 ARTROMOT-K1
一般名称	能動型下肢用他動運動訓練装置 (JMDNコード: 35977002)
類別	機械器具 5 8 整形用機械器具
医療機器分類	管理医療機器
特定保守管理医療機器	該当
医療機器認証番号	227AIBZX00016000
本体の寸法	長さ960mm×幅350mm×高さ230～560mm
本体の質量	約11kg
定格入力	AC100V 50/60Hz 40VA
電撃に対する保護の形式及び程度	クラス II B形
膝屈曲・伸展範囲	-10°～120°
動作速度	55°～153°/min
動作時間	1分～24時間
使用可能体重	～159kg
適用下腿長範囲(膝関節～足底)	250～570mm
適用大腿長範囲(股関節～膝関節)	310～490mm

警告	本品の周辺での携帯電話、無線機器、電気メス、除細動器等、高周波を発生する機器、その他の医療機器等を近づけないこと。また、これらの機器とは別系統の電源を使用すること。〔本品及び上記の機器に誤作動が生じるおそれがあるため〕
禁忌・禁止	・以下の症状のある(または疑いのある)患者には使用しないこと。(1)法定伝染病患者、重篤な患者、妊婦、化膿性関節炎患者 (2)その他医師が本品を使用することが適切でないと判断した患者・本品は膝関節専用の運動訓練装置であり、この用途以外での使用はしないこと。



製造販売業者

日本シグマックス株式会社

本社: 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1
 お客様窓口 TEL.0800-222-6122 (通話料無料)
 受付時間: 9時～17時 (平日) ※土日、祝日、年末年始を除く



※本製品に関するお問い合わせはお客様窓口までお願いいたします。

インターネットで日本シグマックスの情報をご覧いただけます。

日本シグマックスのホームページ <https://www.sigmax-med.jp/>



- 予告なく製品の仕様が変わることがあります。
- カタログの写真と実際の製品とは、色などに違いがある場合があります。その点をご了承ください。
- 各製品は、使用説明書・添付文書を必ずお読みになってからご使用ください。
- 各製品は、医師の指示に従って適切に使用してください。誤った使い方は怪我の原因ともなります。



ARTROMOT-K1

シンプルで、操作性に優れた下肢用CPM。

製品特長

各種設定はすべてリモコンで簡単設定

運転の開始・停止から、伸展／屈曲角度、動作速度、動作時間等の設定は、すべて手元のリモコンで簡単に行えます。



■各種設定範囲

膝屈曲・伸展範囲	-10°~120°(1°刻み)
動作時間	1分~24時間(1分刻み)、時間経過後は自動停止
動作速度	5%~100%(5%刻み) ※目安として、5%で約55°/分、50%で約93°/分、100%で約153°/分
伸展／屈曲固定時間の設定	0~59秒(1秒刻み)及び1~59分(1分刻み)

製品特長

自動停止タイマー機能付き

設定した動作時間になると自動的に停止します。

製品特長

シンプル構造でお手入れが簡単

汚れた部分を拭き取るだけなので、お手入れもシンプルです。



製品特長

患者様に優しいウォームアップ機能

■ウォームアップ機能のイメージ



伸展／屈曲設定角度の中心角度から運動を開始し、設定角度に向けて段階的に運動範囲を広げ、ゆっくりと慣らしていきます。運動開始直後の急激な負荷を軽減します。

製品特長

誤作動を防ぐキーロック機能

膝屈曲・伸展範囲、動作時間設定後、キーロックをすることで誤作動を防ぎます。患者様が誤ってボタンに触れても設定した動作や範囲が変わることはありません。

■製品のご使用にあたって

※本カタログでは、製品の説明を分かりやすくするため、素足の状態での脚を太もも用サポート、ふくらはぎ用サポートに乗せています。



太もも用サポート、ふくらはぎ用サポートはすべりにくい素材でできています。肌のトラブルを避けるため、患者様の肌が太もも用サポート、ふくらはぎ用サポートに直接触れないようストックネット等を脚にかぶせる、長めのパンツを着用する等をお勧めします。

膝関節ケア製品のご提案

診断・治療～リハビリテーション、日常生活、スポーツ復帰まで。

膝関節のケアにトータル提案でフォローします。

診断

診断のサポートに。

十字靭帯機能検査機器



術後～リハビリテーション

クライオセラピーのサポートに。

アイシング製品



※膝関節固定帯：ニースプリントとの併用

膝関節の固定・保護に。

膝関節固定帯



DONJOY ニーブレス



膝関節用サポーター



リハビリテーションのサポートに。

下肢用CPM装置



ARTROMOT-K1

日常生活～スポーツ復帰まで

膝関節用サポーター



スポーツ復帰に。
日本シグマックス株式会社が展開するスポーツ向けブランド「ザムスト」。



※ザムスト製品のお問い合わせは弊社営業担当までご連絡ください。

■保証サービス

ARTROMOT-K1の保証期間は5年間。保証体制やアフターサービスも充実しています。

このようなお困りごとはありませんか？

- CPMは壊れやすい
- よく壊れるので修理費がかかる
- 修理依頼すると返却に時間がかかる。

例えば

リモコン故障

コード断線

ポイント1

保証※期間は5年間

ポイント2

修理回数は制限なし

ポイント3

修理費用**の負担0

※保証範囲は弊社規定に基づきます。 ※ただし、1回の修理費用上限はメーカー希望小売価格と同額とします。

- 修理費の追加負担がないため、コスト削減につながります。
- 見積、決済など不要のため、ご返却までの時間が短縮されます。

詳細は弊社営業担当まで、お問い合わせください。