


卓上型全自動 オートクレーブ



TE-241ER TE-261ER

ToHo 株式会社 東邦製作所

●設置寸法図

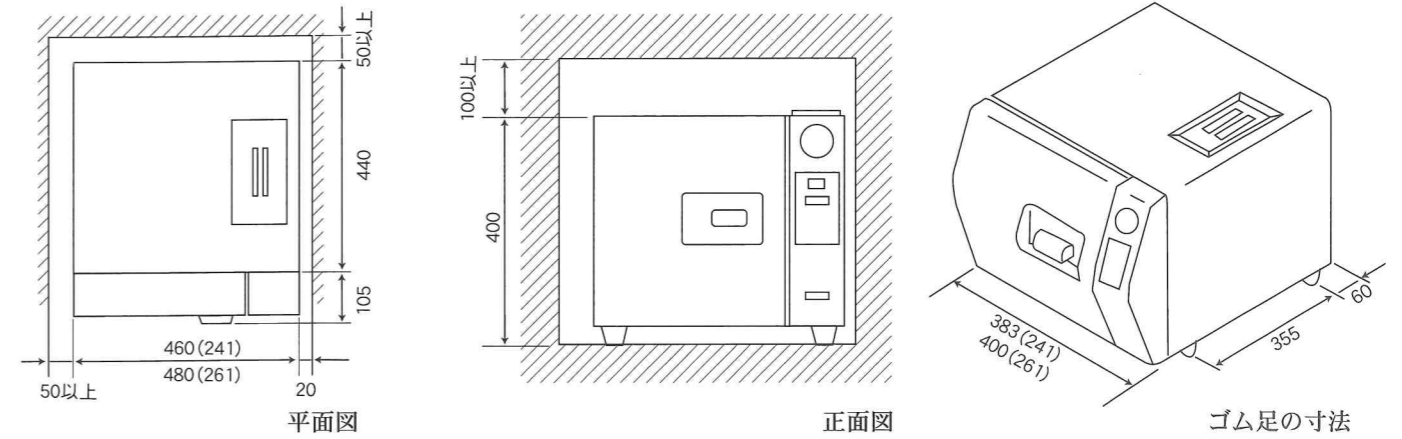

●仕様/規格

販売名	サーボクレーブ TE-241ER	サーボクレーブ TE-261ER
外形寸法 (mm)	W460×D545×H400(取手を含む)	W480×D545×H400(取手を含む)
缶体寸法 (mm)	φ230×奥行338	φ260×奥行363
缶体内容量	丸カスト18cm×2ケ	丸カスト21cm×2ケ
滅菌温度 (°C)	121°C/132°C	
滅菌時間 (標準)	20分~99分/10分~99分(変更可能)	
乾燥時間 (標準)	30分/20分 0~99分(変更可能)	
貯水タンク	3.2リットル	
常用圧力 (MPa)	大気圧~0.2MPa	
安全装置	安全弁、過圧防止回路、自己診断機能、エラー時自動圧力降下 過熱防止回路、ドア閉止確認スイッチ	
電源	AC-100V 15A 50/60Hz	
最大消費電力	1400W	
本体質量	294N(30kg)	323.4N(33kg)
EMC(電磁両立性)	適合(JIS T 0601-1-2:2012)	
一般的名称	小型包装品用高圧蒸気滅菌器(JMDNコード:38671020)	
医療機器クラス分類	管理医療機器(クラスII)、特定保守管理医療機器	
製造承認番号	21800BZX10143000	21800BZX10158000
医療機器製造販売業許可番号	08B2X10003	

●別売品

●専用角カスト
K-20L(241.261)
W175mm×D330mm×H145mm

●丸カスト
18cm(241)×2ケ
21cm(261)×2ケ

●バスケット
B-U190(241)
W190mm×D320mm×H120mm
B-U320(261)
W230mm×D325mm×H120mm

●専用台車
N-22(241.261)
W540mm×D500mm×H800mm

お願い
安全のために右図のようなアース付コンセントをお使いください。

(15A用)

ToHo 株式会社 東邦製作所

■取扱店

- 本社 〒351-0036 埼玉県朝霞市北原1-10-14
TEL 048-474-2151 FAX 048-474-2155
- 埼玉営業所 TEL 048-474-2151 ●松山営業所 TEL 089-922-6284
- 関西営業所 TEL 06-4950-0361 ●福岡営業所 TEL 092-573-0951

製造元 ●鹿島工場 〒314-0254 茨城県神栖市太田4266-5
TEL 0479-46-2571 FAX 0479-46-2573

インテリジェンス・オートクレーブの登場

TE-241ER
TE-261ER

主な特長

■フルオート運転

被滅菌物を入れてモードキーを押すだけ。乾燥時に扉を開けることなく、完了まで行えます。

■コンピューターのP.I.D制御による安定した温度管理

コンピューター制御により、滅菌・乾燥温度を管理。確実な滅菌が出来ます。

■メンテナンスも簡単

給水タンクの水量が見やすく入口も大きくしました。排水は排水口に専用ホースを差し込むだけ。



排水は付属のホースを差し込むだけの簡単操作



フィルター交換も前面からワンタッチで交換できる

■操作しやすいコントロールパネル

プログラムを選択、滅菌時間・乾燥時間の設定、確認が容易に。

- 圧力計**
- 時間ディスプレイ**
滅菌時間・乾燥時間を表示します
- 缶内温度/エラーディスプレイ**
通常は缶内温度を表示し、自己診断機能が作動するとエラーを表示します
- 工程表示ランプ**
ドアランプはドアの開閉状態をその他は機器の動作を表します
- 設定キー**
滅菌時間・乾燥時間を変更するとき使用します
- アップ・ダウンキー**
設定値を変更する場合に使用します
- 滅菌/乾燥モードキー**
132℃/121℃/乾燥のみモードキーを押すとスタートします
- ストップキー**
滅菌作業の中断及びエラー解除のときに押します
- 電源スイッチ**

モード	滅菌温度	標準滅菌時間	標準乾燥時間
	132℃	10分	20分
	121℃	20分	30分
	乾燥のみ	0分	30分

■除菌フィルターによるクリーン乾燥

■送風ポンプの音も静かで、風量も2倍(当社比)にUP