

動物用歯科ユニット

Airvets

DC52

エアーベッツ DC52

*New
model*

これからは動物病院にも
プロフェッショナルなデンタルケアの導入を

プロフェッショナルデンタルケアに必要な
超音波スケーラー・高速ハンドピース・低速ハンドピースなどを
コンパクトに凝縮した動物のための歯科用ユニット

DC51との比較

高性能オイルレスコンプレッサー使用

騒音レベルを大幅に改善

高速エアタービンのトルクアップ!

切削力向上

口腔内バキュームの吸引力大幅アップ!

DC51と比較して約3倍の吸引力

LEDライト付


超音波スケーラー標準装備

MS GROUP
エムエスグループ



エアベッツ DC52 主要機器紹介

各部名称

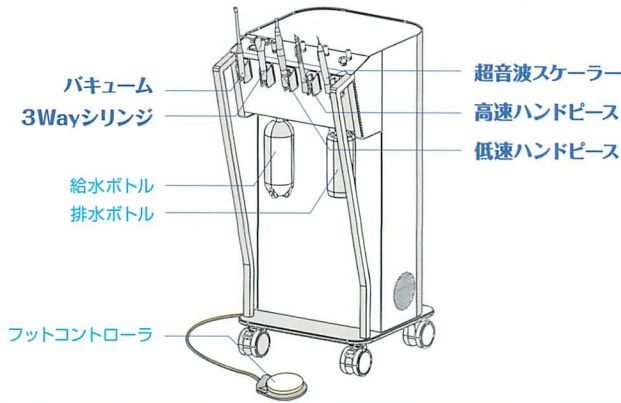

エアベッツ DC52

歯科用ユニット (一般医療機器)

価格

1,380,000円

電気的定格	入力電源 : AC100V 50/60Hz 最大定格 : 1500VA
寸法	W423 × D520 × H910mm
重量	45kg
内蔵コンプレッサー圧力	0.4~0.6MPa



超音波スケーラー (ピエゾ式)

超音波を発生させ機械的振動に変換し、振動を伝達するチップで歯石を粉砕して落とすことができます。振動による熱から歯周組織・歯牙そしてチップを保護するため給水下で使用します。

本ユニットで使用しているスケーラーはピエゾタイプで、効率的で安全な処置が可能です。また、自動トラッキングシステムにより、いつも効率のよい安定した周波数で使用できます。

仕様 周波数 28kHz ± 3kHz

スケーリングチップ



高速ハンドピース (エアタービン)

高品質エアタービンによる、毎分35万回転を実現した高速ハンドピースです。歯牙の切削や分割に使用します。

スムーズで安全な切削が可能で、マイクロモーターと比べ巻き込み事故等が大幅に減少します。

仕様

回転速度	350,000rpm
最大使用空気圧	2Bar (0.2MPa)
最大空気消費量	35L/min
ホースとの接続	4ホール
使用バー	JIS T5504-1 (φ1.60)
バー着脱方式	スクリュー式



低速ハンドピース (エアモーター+プロフィーアングル)

2万回転までの低速域をカバーする低速回転エアモーターと1/4減速比のプロフィーアングルハンドピースの組み合わせにより、低回転でもしっかりとしたトルクを発揮します。

ブラシやラバーカップを用いた、表面研磨用として主に使用します。

仕様

エアモーター	
回転速度	~ 20,000rpm
最大使用空気圧	2Bar (0.2MPa)
最大空気消費量	25L/min
ホースとの接続	JIS T5905 タイプB
ハンドピースとの接続	JIS T5904

プロフィーアングルハンドピース

回転速度	~ 20,000rpm
ラバーカップ等のタイプ	スクリューイン



3Wayシリンジ

1. エアボタンを押すとエアが出ます。
2. 水ボタンを押すと水が出ます。
3. 同時に押すと霧状のエアが出ます。

※3Wayシリンジは独立構造となっております。他のハンドピース使用時に同時使用が可能です。



バキューム

1. ホルダーから外すと自動的に吸引を開始します。
2. ホルダーに戻すと吸引を停止します。

※バキュームは独立構造となっております。他のハンドピース使用時に同時使用が可能です。※バキュームノズルは別売です。

吸引力調節方法

レバーで吸引力を調節します。

●ご使用に際しては、必ず製品添付の「添付文書」および「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。 ●製品の仕様、デザインにつきましては予告なく変更になることがあります。 ●標準価格・表示記載は2014年6月現在のものです。価格に消費税は含まれておりません。

製品に関するお問い合わせはエムエスグループまでお願いします。

販売元

MS GROUP 〒520-2102 滋賀県大津市松が丘7丁目11-1
TEL 077-549-2197 FAX 077-549-2198
エムエスグループ URL <http://msgroup.jp> mail : info@msgroup.jp

製造販売元

株式会社 ナルコム 製作所

本社・工場 〒384-2107 長野県佐久市蓬田 1251-239
営業所 〒270-2253 千葉県松戸市日暮 2-3-15 7F
TEL 047-311-3600 FAX 047-311-3133

E-mail info@narcohm.co.jp URL <http://www.narcohm.co.jp>

