

マットレスとの適合表				91cm幅		83cm幅					
スタンダードマットレス	ストレッチスリム マットレス	[清拭]	レギュラー	KE-771SQ	00170-000740	オープン価格	KE-773SQ	00170-000742	オープン価格		
			ミニ	KE-772SQ	00170-000741	オープン価格	KE-774SQ	00170-000743	オープン価格		
		[通気]	レギュラー	KE-771TQ	00170-000742	オープン価格	KE-773TQ	00170-000747	オープン価格		
			ミニ	KE-772TQ	00170-000746	オープン価格	KE-774TQ	00170-000748	オープン価格		
	プレグラーマットレス	レギュラー	KE-551Q	00170-000159	¥58,300 (税抜 ¥53,000)	KE-553Q	00170-000142	¥58,300 (税抜 ¥53,000)			
		ミニ	KE-5511Q	00170-000286	¥58,300 (税抜 ¥53,000)	KE-5531Q	00170-000285	¥58,300 (税抜 ¥53,000)			
ポケットコイルマットレス クレーターマットレス	レギュラー	RB-ZA91P	00170-001063	¥90,200 (税抜 ¥82,000)	RB-ZA83P	00170-001062	¥83,600 (税抜 ¥76,000)				
	[通気]	レギュラー	KE-761	00170-000043	¥56,100 (税抜 ¥51,000)	KE-763	00170-000044	¥56,100 (税抜 ¥51,000)			
ハイスタンダードマットレス	ストレッチフィット マットレス	[清拭]	レギュラー	KE-781SQ	00170-000730	オープン価格	KE-783SQ	00170-000732	オープン価格		
			ミニ	KE-782SQ	00170-000731	オープン価格	KE-784SQ	00170-000733	オープン価格		
		[通気]	レギュラー	KE-781TQ	00170-000735	オープン価格	KE-783TQ	00170-000737	オープン価格		
			ミニ	KE-782TQ	00170-000736	オープン価格	KE-784TQ	00170-000738	オープン価格		
	エバーフィットC3 マットレス	[清拭]	レギュラー	KE-611SQ	00170-001037	¥89,100 (税抜 ¥81,000)	KE-613SQ	00170-001039	¥89,100 (税抜 ¥81,000)		
			ミニ	KE-612SQ	00170-001038	¥89,100 (税抜 ¥81,000)	KE-614SQ	00170-001040	¥89,100 (税抜 ¥81,000)		
		[通気]	レギュラー	KE-611TQ	00170-001042	¥95,700 (税抜 ¥87,000)	KE-613TQ	00170-001044	¥95,700 (税抜 ¥87,000)		
			ミニ	KE-612TQ	00170-001043	¥95,700 (税抜 ¥87,000)	KE-614TQ	00170-001045	¥95,700 (税抜 ¥87,000)		
		[ドレイ]	レギュラー	KE-611UQ	00170-001033	¥95,700 (税抜 ¥87,000)	KE-613UQ	00170-001035	¥95,700 (税抜 ¥87,000)		
			ミニ	KE-612UQ	00170-001034	¥95,700 (税抜 ¥87,000)	KE-614UQ	00170-001036	¥95,700 (税抜 ¥87,000)		
		床ずれ防止マットレス	静止型マットレス ウレタンフォーム	[清拭]	レギュラー	KE-791SQ	00170-000720	オープン価格	KE-793SQ	00170-000722	オープン価格
					ミニ	KE-792SQ	00170-000721	オープン価格	KE-794SQ	00170-000723	オープン価格
[通気]	レギュラー			KE-791TQ	00170-000725	オープン価格	KE-793TQ	00170-000727	オープン価格		
	ミニ			KE-792TQ	00170-000726	オープン価格	KE-794TQ	00170-000728	オープン価格		
エバーブロード マットレス	[清拭]		レギュラー	KE-621SQ	00170-000970	オープン価格	KE-623SQ	00170-000972	オープン価格		
			ミニ	KE-622SQ	00170-000971	オープン価格	KE-624SQ	00170-000973	オープン価格		
	[通気]		レギュラー	KE-621TQ	00170-000962	オープン価格	KE-623TQ	00170-000964	オープン価格		
			ミニ	KE-622TQ	00170-000963	オープン価格	KE-624TQ	00170-000965	オープン価格		
[ドレイ]	レギュラー		KE-621UQ	00170-000966	オープン価格	KE-623UQ	00170-000968	オープン価格			
	ミニ		KE-622UQ	00170-000967	オープン価格	KE-624UQ	00170-000969	オープン価格			
アクアフロート マットレス	[清拭]		レギュラー	KE-831Q	00170-000505	¥159,500 (税抜 ¥145,000)	KE-833Q	00170-000506	¥146,300 (税抜 ¥133,000)		
			レギュラー	KE-841Q	00170-000507	¥167,200 (税抜 ¥152,000)	KE-843Q	00170-000508	¥154,000 (税抜 ¥140,000)		
	[通気]		ミニ	KE-8411Q	00170-000511	¥167,200 (税抜 ¥152,000)	KE-8431Q	00170-000512	¥154,000 (税抜 ¥140,000)		
			レギュラー	KE-951M	00170-000899	¥181,500 (税抜 ¥165,000)	KE-953M	00170-000900	¥181,500 (税抜 ¥165,000)		
圧切替型 マットレス(エア)	[清拭]		レギュラー	KE-971S	00170-001065	オープン価格	KE-973S	00170-001067	オープン価格		
			ミニ	KE-972S	00170-001066	オープン価格	KE-974S	00170-001068	オープン価格		
	[通気]		レギュラー	KE-971T	00170-001069	オープン価格	KE-973T	00170-001071	オープン価格		
			ミニ	KE-972T	00170-001070	オープン価格	KE-974T	00170-001072	オープン価格		
	[清拭]		レギュラー	KE-931QS	00170-000845	¥254,100 (税抜 ¥231,000)	KE-933QS	00170-000847	¥254,100 (税抜 ¥231,000)		
			ミニ	KE-932QS	00170-000846	¥254,100 (税抜 ¥231,000)	KE-934QS	00170-000848	¥254,100 (税抜 ¥231,000)		
	[清拭]		レギュラー	KE-911S	00170-001351	オープン価格(非課税)	KE-913S	00170-001353	オープン価格(非課税)		
			ミニ	KE-912S	00170-001352	オープン価格(非課税)	KE-914S	00170-001354	オープン価格(非課税)		
[通気]	レギュラー		KE-911T	00170-001355	オープン価格(非課税)	KE-913T	00170-001357	オープン価格(非課税)			
	ミニ		KE-912T	00170-001356	オープン価格(非課税)	KE-914T	00170-001358	オープン価格(非課税)			

\*用途・目的に合わせて機能を追加したマットレス。  
 ※エアマットレスこごちあ利楽flowは非課税です。その他のマットレスは非課税のベッドとセットで購入する場合に限り、非課税となります。

**!** 安全に関するご注意 製品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。  
 最新の情報はホームページでご確認いただけます。

[www.paramount.co.jp](http://www.paramount.co.jp)

本カタログに記載した価格はすべて税抜表示です。別途消費税が加算されます。

## パラマウントベッド株式会社

製品のお問い合わせは **お客様相談室** フリーダイヤル **0120-03-3648**  
 土・日・祝日も受付いたします。受付時間：9:00～17:00(年始1/1～1/3は休業いたします)

本社	〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号	☎(03)3648-1111(代)
東京支店	〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号	☎(03)3648-1171(代)
札幌支店	〒060-0062 札幌市中央区南2条西13丁目318番地11	☎(011)271-1181(代)
仙台支店	〒984-0015 仙台市若林区卸町2丁目3番地の3	☎(022)239-5211(代)
さいたま支店	〒336-0967 さいたま市緑区美園3丁目23番1	☎(048)878-0100(代)
横浜支店	〒194-0004 東京都町田市鶴間5丁目3番33号	☎(042)795-8800(代)
名古屋支店	〒461-0001 名古屋市中区泉1丁目20番17号	☎(052)963-0600(代)
大阪支店	〒550-0001 大阪府西区土佐堀2丁目3番33号	☎(06)6443-8791(代)
高松営業所	〒761-8031 高松市郷東町223番1	☎(087)881-8900(代)
広島支店	〒733-0011 広島市西区横川町3丁目8番5号	☎(082)293-1311(代)
福岡支店	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号	☎(092)461-1131(代)

製品のお求め、ご相談は…

●記載した価格は希望小売価格です。各販売店の販売価格を制限するものではありません。  
 ●カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。

2022年希望小売価格改定版 F23-C00843

as human, for human  
**PARAMOUNT BED**



ご本人様と介護に関わるすべての人を笑顔にしたい。

介護用ベッド 楽匠プラスシリーズ

**楽匠** プラス

**JIS** 産業標準化法に基づくJISマーク表示  
 制度において次の登録認証機関が  
 規格適合したことを認証した商品  
 (認証機関名) **JQA** 一般財団法人 日本品質保証機構

パラマウントベッド株式会社

# 大切な人に、もっと寄り添い、力になる。

パラマウントベッドの楽匠プラスシリーズは、独自の先進技術を結集させた

ご本人様にとっても、介護する方にとっても、確かな力になる介護用ベッドです。

もっとスムーズな背あげで、もっと身体を起こす機会を増やして、もっと快適に過ごすために、

身体の動きに合わせて新たに開発したプラス ライン ボトムを採用。

さらに、新しく搭載した家庭内呼び出し機能で、ご本人様と介護する方のつながりやすさも実現します。

ご本人様の自分らしい生活と、介護する方の笑顔のために、楽匠プラスシリーズが、もっとサポートします。



## もっと、もっと、 身体にやさしくなるために

介護用ベッドでいちばん多く利用されている背あげ機能をさらに磨きあげています。新開発したプラス ライン ボトムをシリーズ全機種に採用することで、先進のラクリアモーションから背ボトムだけを動かすものまで、すべての背あげ機構がグレードアップしています（弊社従来品との比較）。



## もっと、 介護する方とつながるために

スマートフォン用の専用アプリも用意しました。家庭内呼び出し機能で、手元スイッチからスマートフォン\*に通知できます。また、スマートフォンでベッドの操作ができます（使い方は動画で確認できます）。もっとご家族とつながることで、よりよい介護をサポートします。

\*Bluetoothの無線が届く範囲で受信します。



## もっと、 一人ひとりに合わせるために

ご本人様の心身の状態や生活環境、好みなどに配慮した豊富なバリエーションを用意しています。ベッドの機能やサイズ、デザインの組み合わせにより、一人ひとりに合った1台が見つかります。

### JIS認証を取得

楽匠プラスシリーズは、柵（ベッドサイドレール）などの適合するオプション製品を取り付けたときにできる“すき間”についてJIS規格（JIS T 9254）に定められた寸法を遵守しています。また、その組み合わせについて在宅用電動介護用ベッドに関するJIS規格の認証を取得しています。





## もっと身体にやさしく、もっと次の動作につながる。 背あげをさらに進化させるために生まれた プラス ライン ボトム。

要所要所に新しいアイデアを取り入れて開発したプラス ライン ボトムが新登場。


より身体の動きに合った起きあがり動作で骨盤の立った動きやすい起きあがり姿勢を実現しています。

ラクリアモーションだけでなく、すべての背あげ機構で効果を発揮します。

### より姿勢を安定させやすい 背サポート

ここがプラス!


腰部から胸部にかけてボトムの剛性を調整し、より身体にフィットしやすくなりました。背あげするときに背中をしっかり支持します。また、身体との接触面積が広がるので体圧をより分散できます。

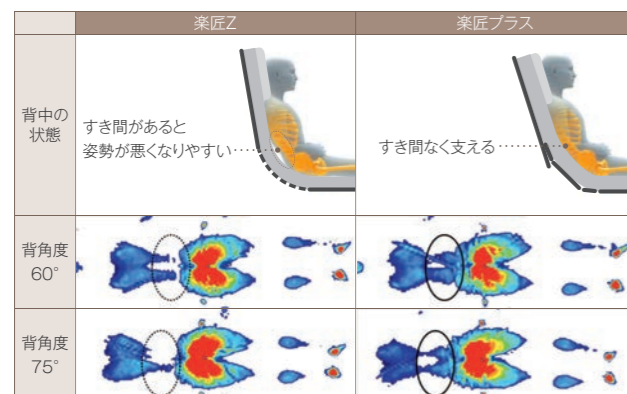

### より骨盤を立てやすい 腰サポート

ここがプラス!


骨盤部にあたるボトムの剛性を高めて曲がり方を変更することで、骨盤をしっかり起こし、身体が動かしやすい背あげ姿勢に移行できます。骨盤をしっかり起こすことで身体が足側にずり落ちにくくなるため、床ずれリスクの軽減にもつながります。

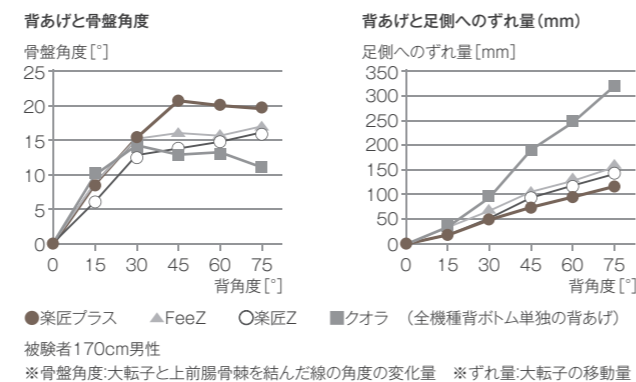

### 身体の軸とベッドの軸を合わせやすい 新しいボトム分割 (腰ボトム)

ここがプラス!


腰ボトムのサイズを人の身体に合わせ、大転子の位置にはガイドを設けました。これにより背あげするときの身体の動きとベッドの動きの軸を合わせやすくなります。また、連動など膝あげを併用する際に、骨盤をホールドするポケットを構成します。

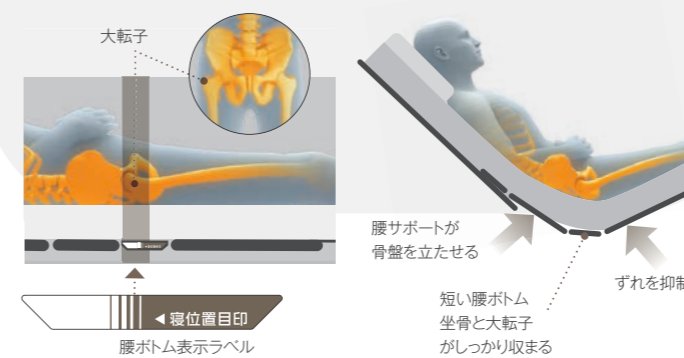

### 身長差をカバーする 膝サポート

ここがプラス!

膝部が多段階で曲がるので、身長差をカバーしてベッドの動きにフィットしやすくなりました。また、膝裏への当たりも良く馴染みやすくなっています。

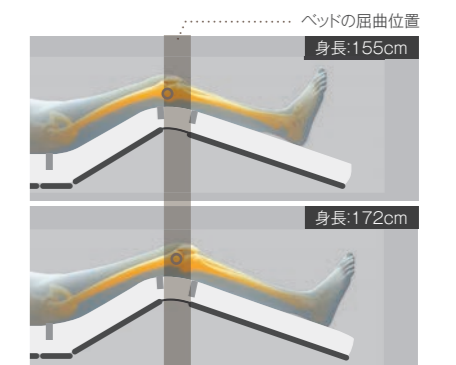

もっと、もっと、身体にやさしくするために

# プラス ライン ボトムだから、 楽匠プラスシリーズのすべての背あげ機構が さらにやさしくグレードアップ。

新開発のプラス ライン ボトムなら、パラマウントベッド独自の起き上がりプログラムも、もっと効果的に利用できます。  
また、さまざまな離床方法を想定したバリエーションを用意。使い方に合わせて選べます。

## ラクリア ラクリアモーション

背と膝の動きにベッドの傾斜を組み合わせた背あげ機能です。身体のずり落ちや圧迫感を大幅に軽減しながら、座位に近く、安定した姿勢に移行できます。また、背あげをするときに体圧を仙骨部からお尻と太ももに再分配し、床ずれリスクに配慮した背あげ方式でもあります。

### ● ラクリア3モーション



身体がずれないように、上体を起こしながら膝をあげます。



少し上体を起こしてから、ベッドを足側に傾斜させます。



傾斜が止まり、さらに上体を起こします。



上体を起こしながら膝をさげます。骨盤が起きた状態で、膝を少し曲げて足先をさげた状態で起きあがります。



骨盤が起きていますので、上体を前傾させやすく、首、肩、腕が動かしやすくなります。

### ● ラクリア2モーション



背の動きに、膝のあげさげとベッドの傾斜を組み合わせているため、上体を起こすときに生ずる身体とマットレスの位置関係の変化を抑えます。



ラクリア3モーションより早いタイミングで膝ボトムがさがります。



最後まで背をあげきらない状態で離床する方に配慮しています。



連動ボタンを押し続けると、背は最大の75°まであがり足先のさがつた起き上がり姿勢に移行できます。

## らくらく らくらくモーション

背と膝のあげさげを組み合わせることで、背あげをするときの身体のずれや圧迫感を抑える背あげ機能です。  
※従来の分割ボトムとらくらくモーションを組み合わせたベッドも用意しています。



身体がずれないように、上体を起こしながら膝をあげます。



上体を起こします。



上体を起こしながら、膝をさげます。膝をさげることで腹部の圧迫感を軽減します。



上体が起きたときには、足が水平に戻り長座位姿勢に移行します。身体のずれが少なく、骨盤が起きていますので、起き上がり姿勢が安定しやすくなります。



安定した姿勢で起きあがれるので、身体が動かしやすくなります。

## らくらくモーションより膝を早めに水平に戻すので、背をあげきらないで離床する方に適しています。 2モーション 連動

背と膝のあげさげを組み合わせることで、背あげをするときの身体のずれや圧迫感を抑える背あげ機能です。膝が水平に戻るタイミングが早く、最後まで背をあげきらない状態で離床する方に配慮しています。



身体がずれないように、上体を起こしながら膝をあげます。



上体を起こします。



上体を起こしながら、膝をさげます。膝をさげることで腹部の圧迫感を軽減します。背ボトムが40°になると、膝ボトムが0°になります。






膝が水平に戻るタイミングが早いので、最後まで背をあげきらない状態で離床する方に配慮しています。



頭ボタンを押し続けると、背は最大の75°まであがり長座位姿勢に移行できます。

楽匠プラスシリーズのラクリアモーションは、前機種と比較して、骨盤角度、身体のずれ量、上半身の曲がり具合において、いずれの評価も上回っています。プラス ライン ボトムにより、ラクリアモーションの効果も向上しています。

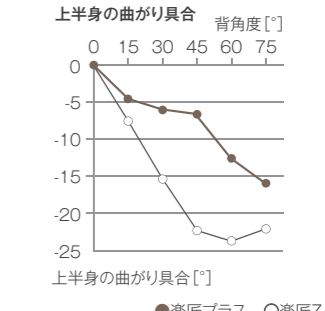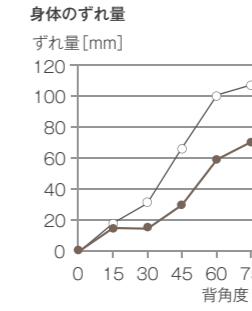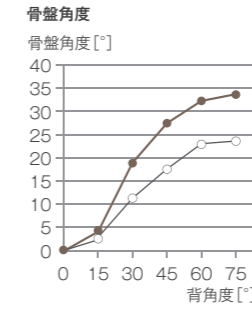

被験者170cm男性 ※骨盤角度:大転子と上前腸骨棘を結んだ線の角度の変化量 ※ずれ量:大転子の移動量 ※上半身の曲がり具合:(肩峰 - 第10肋骨 下端)に対する(第10肋骨 下端 - 上前腸骨棘)の角度差

最低床高21cmからの起き上がり 床高36cmからの起き上がり **ここがプラス!**



ラクリア3モーション、ラクリア2モーションで起きあがると、足先がさがっているため、足が降ろしやすくなります。ラクリア3モーションでは、離床しやすいように、ラクリアモーションを操作するときのベッドの高さによってベッドの傾斜角度を自動的に調節して、起きあがったときの腰ボトムの高さを調節します。

ベッドの高さ	起きあがったときの腰ボトムの高さ
21~25cm	25cmになるように傾斜角度を自動調整
25~54cm	操作前の高さと同じになるように傾斜角度を自動調整
54cmより高い	54cm、傾斜角度は10°に移行

## 家庭内呼び出し機能を搭載。 手元スイッチで、 ご家族のスマートフォンに通知できます。



介護用ベッド初のスマートフォンを利用した家庭内呼び出し機能により、ご本人様と介護する方のつながりやすさを実現。  
手元スイッチの呼び出しボタンを押すと、ご家族のスマートフォンに通知します。  
さらに、スマートフォンでベッドを操作することができ、指先でのボタン操作が難しい方のために、音声操作などにも対応しています。  
接触頻度の高い手元スイッチを共有しないようにするなど、衛生面に配慮した使い方も可能です。

※このページに記載の機能を使用するには「ベッド操作アプリ」をダウンロードする必要があります。  
※一部のスマートフォンでは正しく動作しない場合があります。動作確認端末はパラマウントベッドのホームページをご覧ください。



### 手元スイッチから呼び出しが可能


手元スイッチは無線 (Bluetooth) でスマートフォンと通信できます。手元スイッチの呼び出しボタンを押すと、無線が届く範囲にあるベッドに登録されたスマートフォン\*に通知できます。

\*専用の「ベッド操作アプリ」をインストールしたスマートフォンをベッドに登録する必要があります。ベッド1台に対してスマートフォンは3台まで登録できます。スマートフォンで通知を受信するにはスマートフォンの電源を入れておく必要があります。通知を受信したときの音やバイブレーション、画面表示などは、スマートフォンの機種や設定によって異なります。また、スマートフォンの設定やアプリの状態によっては、通知が正しく受信できない場合があります。詳しくは「ベッド操作アプリ」内のヘルプをご覧ください。  
※ベッドからの家庭内呼び出し機能は、緊急時の使用を目的としたものではありません。  
※スマートフォンを使わなくても、家庭内呼び出し機能が使える専用の呼出受信機 (KQ-PAOJ) も用意しています。



### ベッドの操作方法を動画で確認

楽匠プラスシリーズの使い方を閲覧できます。手元スイッチのボタンごとに1つの動画で説明しているため、初めてお使いになる方もベッドの使い方を理解しやすくなります。

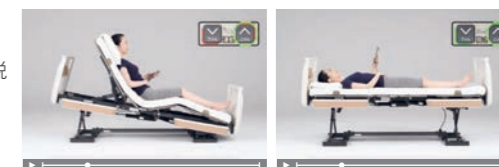

### スマートフォンによるベッド操作

ベッドに登録されたスマートフォンで、付属の手元スイッチと同じようにベッドを操作できるようになります。操作画面はボタンの大きさなどが異なる3種類から選べます。一人ひとりの使いやすさに配慮しています。



コントローラー画面



メモリー画面



セレクト画面

### 指先でのボタン操作が難しい方に対応

指先によるボタン操作が難しい方でも、音声などの情報をもとにベッドを操作できます。また、外部の操作スイッチ (入力スイッチ) との連携も可能です。

音声操作 iOSのみに対応



ベッドの背あげ機能が作動します。

外部の操作スイッチ (入力スイッチ) と連携 iOSのみに対応



入力スイッチ スイッチインターフェイス

※一部のスマートフォンでは正しく動作しない場合があります。動作確認端末はパラマウントベッドのホームページをご覧ください。  
※介護用ベッドを操作する場合は、下記のものが必要です。  
音声操作の場合: iOS/iPadOS端末 (iPhone/iPad/iPod Touch, iOS12以上が対象)  
外部の操作スイッチを使う場合: iOS/iPadOS端末 (iPhone/iPad/iPod Touch, iOS12以上が対象)、外部操作スイッチ (入力スイッチ)、入力スイッチに端末を接続するスイッチインターフェイス  
※上記の操作画面はイメージです。



パラマウントベッドの「ベッド操作アプリ」は、こちらのQRコードを読み取るとダウンロードできます。アプリのダウンロードおよびご利用時には別途通信料がかかります、お客様のご負担となります。Apple IDや Google アカウントは、お客様自身でご確認ください。



福祉用具貸与事業者様に向けたアプリも用意しています → 22 ページ

※Bluetoothロゴは、米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。 ※AppleおよびAppleのロゴは、米国もしくはその他の国や地域におけるApple Inc.の商標です。App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。GoogleおよびGoogle Playのロゴは、Google LLCの商標です。 ※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

## パラマウントベッドらしさ、それは、ご本人様と介護する方双方にとっての使いやすさです。

介護用ベッドがどんなに進化を遂げても“ご本人様や介護する方が、どんな時でも安心して使えるように”という考え方は変わりません。細部に至るまでその思いを行き届かせたパラマウントベッドらしさをご紹介します。



■ 大きくはっきりとした文字で表示する表示パネル

ベッドの角度や高さの数値を見やすく表示します。

■ 操作する内容ごとに色分けされた大型ボタン

あげさげボタンを識別できるように突起を設け、ボタンを押したときには電子音を発するなど、目と指と耳で確認できるように工夫しています。

■ メモリーポジション機能

「メモリー」のボタン ① ② にひとつずつ、よく使うポジションやお好みのポジションを登録できます。例えば介護する方が代わっても、正確なポジション再現が可能です。

※1モーターシリーズを除く。



### より多くの方が使いやすい手元スイッチ

手になじみやすく持ちやすい大きさや形状の手元スイッチです。大型のフックを設けており、ベッドサイドレールなどに掛けて使用できます。また、握力の弱い方などにも配慮して、さまざまな持ち方に対応できるように配慮しています。

### 介護のしやすさに配慮

#### 介護しやすい高さを設定できる


ベッドを最大64.5cm\*まで高くできるため、身長が高い方も腰に負担がかかりにくい姿勢で介護できます。また楽匠プラスシリーズの高さ調節は、ベッドが前後に動かない垂直昇降方式です。端座位を取っているときにあげさげしても姿勢が安定しやすくなります。

\*ゆかからボトム上面までの高さ(マットレスの厚みは含みません)。Xタイプの脚座を超低床位置に取り付けた場合は、最大58.5cmまで高くできます。1モーターシリーズ(背あけ)は高さ調節ができません。なお、脚座を付け替えることで最低床高を2段階に調整することは可能です。



#### 足先の角度調節機能

膝あげをするときに足先を高くすることができます。足先の角度は2段階に切り替えられます。「歩きにくい」「靴や靴下がはきにくい」など離床の障害ともなる足のむくみにも配慮しています。

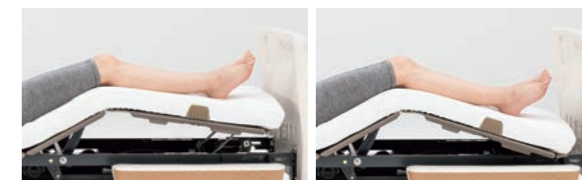

### 安全・安心に配慮

#### 最低床高15cmの超低床にも対応

ここがプラス!

楽匠プラスシリーズは、最低床高21cmと低く抑えた設計です。さらにXタイプでは、脚座を取り付ける向きを変えることで、最低床高15cmの超低床ベッドに切り替えられます。初めてふとんからベッドに移行される方や、ベッドから転落する心配のある方にも導入しやすいように配慮しています。



#### 停電時や緊急時にベッドを操作できるスマートハンドル(一部機種に標準で付属)

災害などによる停電、ベッドの故障などの緊急時に、ハンドル操作でベッドポジションを調節できるスマートハンドルを用意しています。電動ベッドにスマートハンドルを接続しハンドルを回すことで、操作に必要な電気を供給できます。



●楽匠プラスシリーズとスマートハンドルの適合表

		Hタイプ			Xタイプ				
		ラクリア3モーション	ラクリア2モーション	2モーション	3モーター	2モーション	2モーター	1モーター(背あけ)	1モーター(高さ)
KQ-P70S	背	あげ	○	○	○	○	○	○	×
		さげ	○	○	○	○	○	○	×
	膝	あげ	○	○	○	○	○	×	×
		さげ	○	○	○	○	×	×	×
高さ	あげ	×	×	×	×	×	×	×	
	さげ	○*(頭側のみ)	○*(頭側のみ)	×*	○	○	○	○	
NN-2000	背	あげ	○	○	○	○	○	○	×
		さげ	○	○	○	○	○	○	×
	膝	あげ	○	○	○	○	○	×	×
		さげ	○	○	○	○	×	×	×
高さ	あげ	×	×	×	×	×	×	×	
	さげ	○*	○*	×*	○	○	○	×	

\*Hタイプでの「高さ(さげ)」は傾斜角度を水平にするために使用してください。Hタイプ2モーションには傾斜機能はありませんのでご使用はおやめください。

※Hタイプには、スマートハンドル(KQ-P70S)が付属した機種を用意しています。▶13-14ページ

#### 高頻度接触部位の衛生面に配慮


ボードやサイドレール(別売)などの接触頻度の高い部位は耐薬品性に優れた材質を使用しており、清拭消毒(薬品などで拭く)に対応しています。衛生管理や感染対策のしやすさにも配慮しています。

用途に合わせて豊富なオプション製品を用意しています。詳しくは17~21ページをご覧ください。

## 使いやすさと安心感をカタチに。 より心地のよい環境づくりをサポートします。

ご本人様の生活環境や好みに、新しい介護用ベッドがずっと馴染むように。

お部屋に合わせてやすいカラーバリエーションや、身の回りの小物の収納に便利な棚ユニットを用意しています。

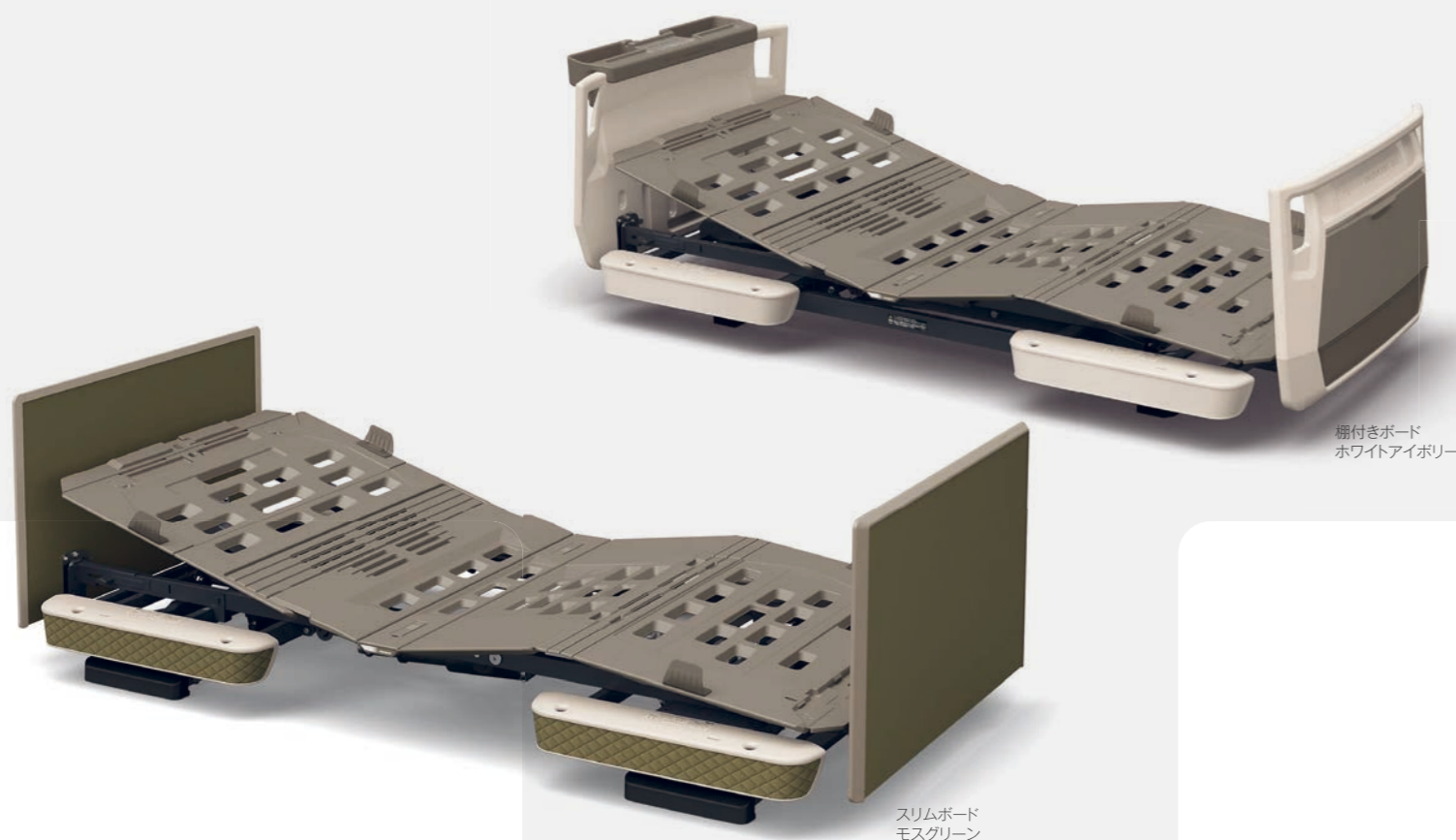

棚付きボード  
ホワイトアイボリー

スリムボード  
モスグリーン

多機能ボード  
グレージュ

### 選べる3種類のボード

#### ■ 多機能ボード



伝い歩きなどに便利なグリップを設けています。グリップはベッドの内側からもつかまれる形状にしてあり、ご本人様が寝位置を調整するときにも利用できる形状です。収納カバーは前機種から幅を17cm、高さを8cm拡大、標準サイズ(M)のスライディングボードが収まります。収納カバーの下部には、収納物の有無がわかる半透明の材質を採用しています。

#### ■ スリムボード



グレード感のあるアースカラーの木製ボードです。スリムなサイズによりベッドの全長が短く、設置スペースが少なく済みます。また、病院用ベッドと同じ耐薬品性を備え凹凸の少ない形状で、清拭消毒に適した仕様とすることで、衛生管理や感染対策にも配慮しています。

#### ■ 棚付きボード




スマートフォンや、メガネ、リモコンなどを置ける棚を追加したボードです。スマートフォンなどの充電に使える電源コンセントも2口設けています。頭側・足側いずれにも取り付けられます。また、収納カバーも頭側、足側いずれにも付け替え可能です。

※棚付きボードを選んだ場合、ボードはキルト調シートのないホワイトアイボリーになります。

※夜間の介護などに便利な照明付きタイプも用意しています。

### 自然を身近に感じさせるアースカラーのバリエーション

「人は本能的に自然とのつながりを求める」というバイオフィリアの考え方を取り入れたアースカラーのデザインを展開。レザー柄のキルト調シートでモスグリーン、キヤメル、グレージュの3色とシートのないホワイトアイボリー、計4種類のカラーを用意しています。キルト調シートは、クッション性があり本革のような上質で自然な感触に、傷の付きにくい高い耐久性を備えています。

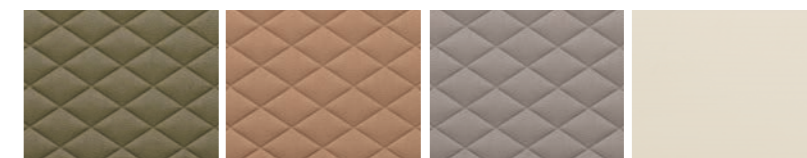

モスグリーン

キヤメル

グレージュ

ホワイトアイボリー

### もうひとつの癒しを。——バイオフィリックデザイン——

自然をイメージさせるものに接することで、幸福感の高まり、ストレスの軽減、活動意欲の向上などの心理的な効果が期待できるとして、オフィススペースや商業施設に「バイオフィリックデザイン」を導入する例が増えています。


もっと、一人ひとりに合わせるために

## 多彩な組み合わせからお選びいただけます。

起きあがりプログラムなどのベッドの機能、仕様やカラーなどを組み合わせることで、一人ひとりに合った1台が見つかります。

1台のベッドで、レギュラー・ミニのサイズ変更が可能

楽匠プラスシリーズは、1台のベッドでレギュラーとミニとのサイズ変更が可能です。

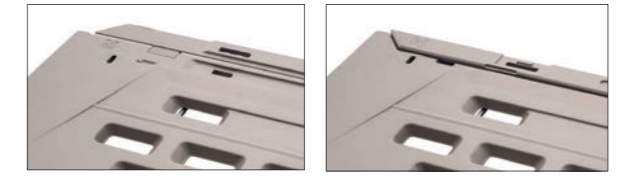


レギュラー

ミニ

ベッドの機能	適合するマットレス(幅)	ボード*4	停電対策	カラー							
				モスグリーン		キャメル		グレージュ		ホワイトアイボリー	
				製品コード	TAISコード	製品コード	TAISコード	製品コード	TAISコード	製品コード	TAISコード
<b>ラクリア3モーションシリーズ</b> 	91cm	多機能ボード	-	KQ-A6311	00170-001315	KQ-A6322	00170-001328	KQ-A6333	00170-001338	KQ-A6300	00170-001314
			スマートハンドル付属	KQ-A6311S	00170-001317	KQ-A6322S	00170-001329	KQ-A6333S	00170-001339	KQ-A6300S	00170-001316
		スリムボード	-	KQ-A6314	00170-001442	KQ-A6325	00170-001450	KQ-A6336	00170-001458	-	-
			スマートハンドル付属	KQ-A6314S	00170-001443	KQ-A6325S	00170-001451	KQ-A6336S	00170-001459	-	-
	83cm	多機能ボード	-	KQ-A6318	00170-001489	KQ-A6328	00170-001492	KQ-A6338	00170-001494	KQ-A6308	00170-001488
			スマートハンドル付属	KQ-A6318S	00170-001491	KQ-A6328S	00170-001493	KQ-A6338S	00170-001495	KQ-A6308S	00170-001490
		スリムボード	-	KQ-A6317	00170-001323	KQ-A6327	00170-001332	KQ-A6337	00170-001340	KQ-A6307	00170-001322
			スマートハンドル付属	KQ-A6317S	00170-001325	KQ-A6327S	00170-001333	KQ-A6337S	00170-001341	KQ-A6307S	00170-001324
<b>ラクリア2モーションシリーズ</b> 	91cm	多機能ボード	-	KQ-AA311	00170-001575	KQ-AA322	00170-001593	KQ-AA333	00170-001611	KQ-AA300	00170-001573
			スマートハンドル付属	KQ-AA311S	00170-001576	KQ-AA322S	00170-001594	KQ-AA333S	00170-001612	KQ-AA300S	00170-001574
		スリムボード	-	KQ-AA314	00170-001581	KQ-AA325	00170-001599	KQ-AA336	00170-001617	-	-
			スマートハンドル付属	KQ-AA314S	00170-001582	KQ-AA325S	00170-001600	KQ-AA336S	00170-001618	-	-
	83cm	多機能ボード	-	KQ-AA318	00170-001589	KQ-AA328	00170-001605	KQ-AA338	00170-001621	KQ-AA308	00170-001625
			スマートハンドル付属	KQ-AA318S	00170-001590	KQ-AA328S	00170-001606	KQ-AA338S	00170-001622	KQ-AA308S	00170-001626
		スリムボード	-	KQ-AA317	00170-001587	KQ-AA327	00170-001603	KQ-AA337	00170-001619	KQ-AA307	00170-001623
			スマートハンドル付属	KQ-AA317S	00170-001588	KQ-AA327S	00170-001604	KQ-AA337S	00170-001620	KQ-AA307S	00170-001624
<b>2モーションシリーズ</b> 	91cm	多機能ボード	-	KQ-A5311	00170-001287	KQ-A5322	00170-001300	KQ-A5333	00170-001310	KQ-A5300	00170-001286
			スマートハンドル付属	KQ-A5311S	00170-001289	KQ-A5322S	00170-001301	KQ-A5333S	00170-001311	KQ-A5300S	00170-001288
		スリムボード	-	KQ-A5314	00170-001424	KQ-A5325	00170-001432	KQ-A5336	00170-001440	-	-
			スマートハンドル付属	KQ-A5314S	00170-001425	KQ-A5325S	00170-001433	KQ-A5336S	00170-001441	-	-
	83cm	多機能ボード	-	KQ-A5318	00170-001481	KQ-A5328	00170-001484	KQ-A5338	00170-001486	KQ-A5308	00170-001480
			スマートハンドル付属	KQ-A5318S	00170-001483	KQ-A5328S	00170-001485	KQ-A5338S	00170-001487	KQ-A5308S	00170-001482
		スリムボード	-	KQ-A5317	00170-001295	KQ-A5327	00170-001304	KQ-A5337	00170-001312	KQ-A5307	00170-001294
			スマートハンドル付属	KQ-A5317S	00170-001297	KQ-A5327S	00170-001305	KQ-A5337S	00170-001313	KQ-A5307S	00170-001296
<b>2モーションシリーズ</b> 	多機能ボード	-	KQ-A5111	00170-001287	KQ-A5122	00170-001300	KQ-A5133	00170-001310	KQ-A5100	00170-001286	
		スマートハンドル付属	KQ-A5111S	00170-001289	KQ-A5122S	00170-001301	KQ-A5133S	00170-001311	KQ-A5100S	00170-001288	
	スリムボード	-	KQ-A5114	00170-001424	KQ-A5125	00170-001432	KQ-A5136	00170-001440	-	-	
		スマートハンドル付属	KQ-A5114S	00170-001425	KQ-A5125S	00170-001433	KQ-A5136S	00170-001441	-	-	
<b>2モーションシリーズ</b> 	多機能ボード	-	KQ-A5118	00170-001481	KQ-A5128	00170-001484	KQ-A5138	00170-001486	KQ-A5108	00170-001480	
		スマートハンドル付属	KQ-A5118S	00170-001483	KQ-A5128S	00170-001485	KQ-A5138S	00170-001487	KQ-A5108S	00170-001482	
	スリムボード	-	KQ-A5117	00170-001295	KQ-A5127	00170-001304	KQ-A5137	00170-001312	KQ-A5107	00170-001294	
		スマートハンドル付属	KQ-A5117S	00170-001297	KQ-A5127S	00170-001305	KQ-A5137S	00170-001313	KQ-A5107S	00170-001296	

寸法表 (Hタイプ)	
91cm幅	83cm幅
<b>多機能ボード</b> A 99.4cm (格納 92.4cm) B 212.4cm (ミニ 201.4cm) C 脚座中心間 133.5cm 脚座外~外 160.1cm D 21~64.5cm E 40.6cm F 40.6cm	<b>多機能ボード</b> A 92.4cm B 212.4cm (ミニ 201.4cm) C 脚座中心間 133.5cm 脚座外~外 160.1cm D 21~64.5cm E 40.6cm F 40.6cm
<b>スリムボード</b> A 99.4cm (格納 92.4cm) B 201.6cm (ミニ 190.6cm) C 脚座中心間 133.5cm 脚座外~外 160.1cm D 21~64.5cm E 40.6cm F 40.6cm	<b>スリムボード</b> A 92.4cm B 201.6cm (ミニ 190.6cm) C 脚座中心間 133.5cm 脚座外~外 160.1cm D 21~64.5cm E 40.6cm F 40.6cm
<b>棚付きボード</b> A 99.4cm (格納 92.4cm) B 218.9cm (ミニ 207.9cm) C 脚座中心間 133.5cm 脚座外~外 160.1cm D 21~64.5cm E 42.3cm*3 F 40.6cm*3	<b>棚付きボード</b> A 92.4cm B 218.9cm (ミニ 207.9cm) C 脚座中心間 133.5cm 脚座外~外 160.1cm D 21~64.5cm E 42.3cm*3 F 40.6cm*3

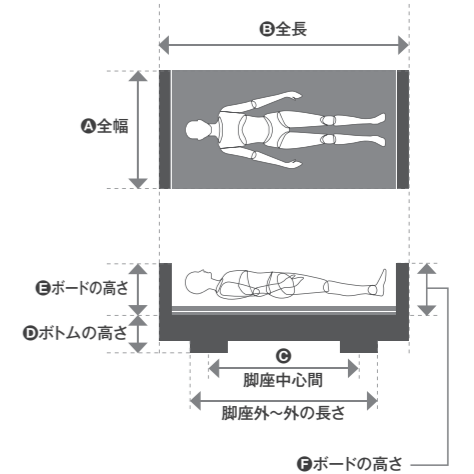


※全機種オープン価格です。  
 ※スマートハンドル付属機種は、JIS認証を取得したベッドとスマートハンドルKQ-P70Sをセットにして販売するものであり、セットで認証を取得したものではありません。



ベッドの機能	適合する マットレス(幅)	ボード*4	停電対策	カラー							
				モスクリーン		キャメル		グレージュ		ホワイトアイボリー	
				製品コード	TAISコード	製品コード	TAISコード	製品コード	TAISコード	製品コード	TAISコード
<b>3モーター シリーズ</b>  PLUS 5軸モーション 最低床高15cm ベッド操作アプリ対応 背あげ 0~75° 膝あげ 0~30° 足先調節 (手動) 高さ調節 21~64.5cm (15cm~58.5cm*) (垂直昇降方式)	91cm	多機能ボード	—	KQ-A3311	00170-001259	KQ-A3322	00170-001265	KQ-A3333	00170-001270	KQ-A3300	00170-001258
		スリムボード	—	KQ-A3314	00170-001406	KQ-A3325	00170-001410	KQ-A3336	00170-001414	—	—
		棚付きボード	—	KQ-A3318	00170-001473	KQ-A3328	00170-001474	KQ-A3338	00170-001475	KQ-A3308	00170-001472
		棚付きボード(照明付き)	—	KQ-A3317	00170-001263	KQ-A3327	00170-001267	KQ-A3337	00170-001271	KQ-A3307	00170-001262
	83cm	多機能ボード	—	KQ-A3111	00170-001259	KQ-A3122	00170-001265	KQ-A3133	00170-001270	KQ-A3100	00170-001258
		スリムボード	—	KQ-A3114	00170-001406	KQ-A3125	00170-001410	KQ-A3136	00170-001414	—	—
		棚付きボード	—	KQ-A3118	00170-001473	KQ-A3128	00170-001474	KQ-A3138	00170-001475	KQ-A3108	00170-001472
		棚付きボード(照明付き)	—	KQ-A3117	00170-001263	KQ-A3127	00170-001267	KQ-A3137	00170-001271	KQ-A3107	00170-001262
<b>2モーション シリーズ</b>  PLUS 2軸モーション 最低床高15cm ベッド操作アプリ対応 背あげ 0~75° 膝あげ 0~20° (2軸モーション) 足先調節 (手動) 高さ調節 21~64.5cm (15cm~58.5cm*) (垂直昇降方式)	91cm	多機能ボード	—	KQ-A4311	00170-001273	KQ-A4322	00170-001279	KQ-A4333	00170-001284	KQ-A4300	00170-001272
		スリムボード	—	KQ-A4314	00170-001415	KQ-A4325	00170-001419	KQ-A4336	00170-001423	—	—
		棚付きボード	—	KQ-A4318	00170-001477	KQ-A4328	00170-001478	KQ-A4338	00170-001479	KQ-A4308	00170-001476
		棚付きボード(照明付き)	—	KQ-A4317	00170-001277	KQ-A4327	00170-001281	KQ-A4337	00170-001285	KQ-A4307	00170-001276
	83cm	多機能ボード	—	KQ-A4111	00170-001273	KQ-A4122	00170-001279	KQ-A4133	00170-001284	KQ-A4100	00170-001272
		スリムボード	—	KQ-A4114	00170-001415	KQ-A4125	00170-001419	KQ-A4136	00170-001423	—	—
		棚付きボード	—	KQ-A4118	00170-001477	KQ-A4128	00170-001478	KQ-A4138	00170-001479	KQ-A4108	00170-001476
		棚付きボード(照明付き)	—	KQ-A4117	00170-001277	KQ-A4127	00170-001281	KQ-A4137	00170-001285	KQ-A4107	00170-001276
<b>2モーター シリーズ</b>  PLUS 最低床高15cm ベッド操作アプリ対応 背あげ 0~75° 膝あげ 0~14° (背送運動) 足先調節 (手動) 高さ調節 21~64.5cm (15cm~58.5cm*) (垂直昇降方式)	91cm	多機能ボード	—	KQ-A2311	00170-001245	KQ-A2322	00170-001251	KQ-A2333	00170-001256	KQ-A2300	00170-001244
		スリムボード	—	KQ-A2314	00170-001397	KQ-A2325	00170-001401	KQ-A2336	00170-001405	—	—
		棚付きボード	—	KQ-A2318	00170-001469	KQ-A2328	00170-001470	KQ-A2338	00170-001471	KQ-A2308	00170-001468
		棚付きボード(照明付き)	—	KQ-A2317	00170-001249	KQ-A2327	00170-001253	KQ-A2337	00170-001257	KQ-A2307	00170-001248
	83cm	多機能ボード	—	KQ-A2111	00170-001245	KQ-A2122	00170-001251	KQ-A2133	00170-001256	KQ-A2100	00170-001244
		スリムボード	—	KQ-A2114	00170-001397	KQ-A2125	00170-001401	KQ-A2136	00170-001405	—	—
		棚付きボード	—	KQ-A2118	00170-001469	KQ-A2128	00170-001470	KQ-A2138	00170-001471	KQ-A2108	00170-001468
		棚付きボード(照明付き)	—	KQ-A2117	00170-001249	KQ-A2127	00170-001253	KQ-A2137	00170-001257	KQ-A2107	00170-001248
<b>1モーター シリーズ (背あげ)</b>  PLUS 最低床高15cm ベッド操作アプリ対応 背あげ 0~75° 膝あげ 0~14° (背送運動) 足先調節 (手動) 高さ調節 15~21cm (組み替え可能)	91cm	多機能ボード	—	KQ-A1311	00170-001231	KQ-A1322	00170-001237	KQ-A1333	00170-001242	KQ-A1300	00170-001230
		スリムボード	—	KQ-A1314	00170-001388	KQ-A1325	00170-001392	KQ-A1336	00170-001396	—	—
		棚付きボード	—	KQ-A1318	00170-001465	KQ-A1328	00170-001466	KQ-A1338	00170-001467	KQ-A1308	00170-001464
		棚付きボード(照明付き)	—	KQ-A1317	00170-001235	KQ-A1327	00170-001239	KQ-A1337	00170-001243	KQ-A1307	00170-001234
	83cm	多機能ボード	—	KQ-A1111	00170-001231	KQ-A1122	00170-001237	KQ-A1133	00170-001242	KQ-A1100	00170-001230
		スリムボード	—	KQ-A1114	00170-001388	KQ-A1125	00170-001392	KQ-A1136	00170-001396	—	—
		棚付きボード	—	KQ-A1118	00170-001465	KQ-A1128	00170-001466	KQ-A1138	00170-001467	KQ-A1108	00170-001464
		棚付きボード(照明付き)	—	KQ-A1117	00170-001235	KQ-A1127	00170-001239	KQ-A1137	00170-001243	KQ-A1107	00170-001234
<b>1モーター シリーズ (高さ)</b>  最低床高15cm ベッド操作アプリ対応 高さ調節 21~64.5cm (15cm~58.5cm*) (垂直昇降方式)	91cm	多機能ボード	—	KQ-A0311	00170-001217	KQ-A0322	00170-001223	KQ-A0333	00170-001228	KQ-A0300	00170-001216
		スリムボード	—	KQ-A0314	00170-001379	KQ-A0325	00170-001383	KQ-A0336	00170-001387	—	—
		棚付きボード	—	KQ-A0318	00170-001461	KQ-A0328	00170-001462	KQ-A0338	00170-001463	KQ-A0308	00170-001460
		棚付きボード(照明付き)	—	KQ-A0317	00170-001221	KQ-A0327	00170-001225	KQ-A0337	00170-001229	KQ-A0307	00170-001220
	83cm	多機能ボード	—	KQ-A0111	00170-001217	KQ-A0122	00170-001223	KQ-A0133	00170-001228	KQ-A0100	00170-001216
		スリムボード	—	KQ-A0114	00170-001379	KQ-A0125	00170-001383	KQ-A0136	00170-001387	—	—
		棚付きボード	—	KQ-A0118	00170-001461	KQ-A0128	00170-001462	KQ-A0138	00170-001463	KQ-A0108	00170-001460
		棚付きボード(照明付き)	—	KQ-A0117	00170-001221	KQ-A0127	00170-001225	KQ-A0137	00170-001229	KQ-A0107	00170-001220

	寸法表 (Xタイプ)			
	91cm幅	83cm幅		
多機能ボード	A99.4cm(格納 92.4cm) B212.4cm(ミニ 201.4cm) C脚座中心間125.1cm 脚座外~外134.1cm D21*2~64.5cm (超低床15*2~58.5cm) E40.6cm F40.6cm	A92.4cm B212.4cm(ミニ 201.4cm) C脚座中心間125.1cm 脚座外~外134.1cm D21*2~64.5cm (超低床15*2~58.5cm) E40.6cm F40.6cm		
	スリムボード	A99.4cm(格納 92.4cm) B201.6cm(ミニ 190.6cm) C脚座中心間125.1cm 脚座外~外160.1cm D21*2~64.5cm (超低床15*2~58.5cm) E40.6cm F40.6cm	A92.4cm B201.6cm(ミニ 190.6cm) C脚座中心間125.1cm 脚座外~外160.1cm D21*2~64.5cm (超低床15*2~58.5cm) E40.6cm F40.6cm	
		棚付きボード	A99.4cm(格納 92.4cm) B218.9cm(ミニ 207.9cm) C脚座中心間125.1cm 脚座外~外134.1cm D21*2~64.5cm (超低床15*2~58.5cm) E42.3cm*3 F40.6cm*3	A92.4cm B218.9cm(ミニ 207.9cm) C脚座中心間125.1cm 脚座外~外134.1cm D21*2~64.5cm (超低床15*2~58.5cm) E42.3cm*3 F40.6cm*3

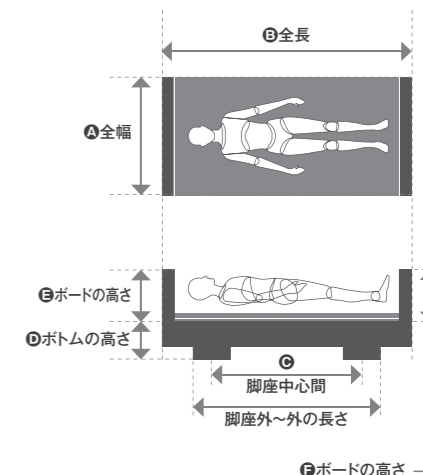

\*1 脚座を超低床位置に取り付けた場合の高さです。 \*2 1モーターシリーズ(背あげ)のボトムの高さは、脚座を低床の向きで取り付けた場合は21cmで、超低床の向きで取り付けた場合は15cmで固定になります。 \*3 棚を頭側に取り付けた場合の高さです。 \*4 棚付きボードには、夜間の介護などに便利な照明付きタイプも用意しています。

※全機種オープン価格です。 ※1モーターシリーズ(高さ)を除き、非課税となります。 ※スマートハンドル付属機種は、JIS認証を取得したベッドとスマートハンドルKQ-P70Sをセットにして販売するものであり、セットで認証を取得したものではありません。



# オプション

壁ぎわに設置したベッドでも使えるテーブルです。



KF-1930

ベッドサイドテーブル(ガススプリング式)				
KF-1920	アイボリー	00170-000716	¥70,400	(税抜 ¥64,000)
KF-1930	ミディアム	00170-000751	¥74,800	(税抜 ¥68,000)
KF-1950	ビーチ	00170-000717	¥74,800	(税抜 ¥68,000)
KF-1960	チェリー	00170-000718	¥74,800	(税抜 ¥68,000)
KF-1970	ウォールナット	00170-000719	¥74,800	(税抜 ¥68,000)

●寸法：(幅)90.7×(奥)44.5×(高)61~92.5cm 天板寸法：(幅)90×(奥)40cm



ベッドサイドテーブル(ノブボルト固定式)				
KF-282	アイボリー	00170-000399	¥44,000	(税抜 ¥40,000)

●寸法：テーブル本体／(幅)80.8×(奥)45×(高)63~95.5cm(13段階調節可能)  
天板／(幅)80×(奥)40cm

●楽匠プラスシリーズとベッドサイドテーブルの適合表

製品コード	Hタイプ (最低床高21cm)	Xタイプ		
		脚座が超低床時 (最低床高15cm)	脚座が低床時 (最低床高21cm)	オプション脚座セット+ ハイトスパーサー (最低床高22cm)
KF-19*0	△	×	○	○
KF-282	△	×	△	○

※△は高さ調節機能で床高を24cm以上にすれば使用可能です。

レバーを操作するだけで高さ調節が行えるテーブルです。



KF833LB

オーバーベッドテーブル(テーブル移動ロック機構付き)				
■支柱内寸法 112.5cm*1				
KF-833LA	アイボリー	00170-000315	¥124,300	(税抜 ¥113,000)
KF-833LB	ミディアム	00170-000317	¥141,900	(税抜 ¥129,000)
KF-833LD	ウォールナット	00170-001497	¥141,900	(税抜 ¥129,000)
■支柱内寸法 98.5cm*2				
KF-833SA	アイボリー	00170-000316	¥124,300	(税抜 ¥113,000)
KF-833SB	ミディアム	00170-000318	¥141,900	(税抜 ¥129,000)

●寸法：[KF-833LA, KF-833LB, KF-833LD]  
(幅)128.4×(奥)63.4×(高)63~95cm、天板寸法：(幅)128.4×(奥)40cm  
[KF-833SA, KF-833SB]  
(幅)114.4×(奥)63.4×(高)63~95cm、天板寸法：(幅)114.4×(奥)40cm  
\*1 ベッド(オプションを取り付けた状態)の総幅が110cmを超えると利用できません。  
\*2 ベッド(オプションを取り付けた状態)の総幅が96cmを超えると利用できません。



KF-832LB

オーバーベッドテーブル(テーブル移動ロック機構なし)				
■支柱内寸法 112.5cm*1				
KF-832LA	91cm幅 アイボリー	00170-000321	¥96,800	(税抜 ¥88,000)
KF-832LB	91cm幅 ミディアム	00170-000323	¥113,300	(税抜 ¥103,000)
KF-832LD	91cm幅 ウォールナット	00170-001496	¥113,300	(税抜 ¥103,000)
■支柱内寸法 98.5cm*2				
KF-832SA	83cm幅 アイボリー	00170-000322	¥96,800	(税抜 ¥88,000)
KF-832SB	83cm幅 ミディアム	00170-000324	¥113,300	(税抜 ¥103,000)

●寸法：[KF-832LA, KF-832LB, KF-832LD]  
(幅)128.4×(奥)43.2×(高)63~95cm、天板寸法：(幅)128.4×(奥)40cm  
[KF-832SA, KF-832SB]  
(幅)114.4×(奥)43.2×(高)63~95cm、天板寸法：(幅)114.4×(奥)40cm  
\*1 ベッド(オプションを取り付けた状態)の総幅が110cmを超えると利用できません。  
\*2 ベッド(オプションを取り付けた状態)の総幅が96cmを超えると利用できません。



オーバーベッドテーブル (ノブボルト調節式)				
■脚部内寸法 KF-813/111.2cm*1 KF-814/103.2cm*2				
KF-813	91cm幅 アイボリー	00170-000387	¥42,900	(税抜 ¥39,000)
KF-814	83cm幅 アイボリー	00170-000372	¥42,900	(税抜 ¥39,000)
●寸法：[KF-813] (幅)121×(奥)40×(高)63~95.5cm(13段階調節可能)、脚部内寸法:111.2cm、 天板寸法：(幅)121×(奥)40cm [KF-814] (幅)113×(奥)40×(高)63~95.5cm(13段階調節可能)、脚部内寸法:103.2cm、 天板寸法：(幅)113×(奥)40cm *1 ベッド(オプションを取り付けた状態)の総幅が108.7cmを超えると利用できません。 *2 ベッド(オプションを取り付けた状態)の総幅が100.7cmを超えると利用できません。				

ベッドサイドで、また車椅子と組み合わせて使うことができます。



KF-850

リハビリテーブル				
KF-850	天板ティルト機構	00170-000265	¥119,900	(税抜 ¥109,000)
KF-840	コンパクトサイズ	00170-000489	¥75,900	(税抜 ¥69,000)
●寸法：[KF-850] (幅)90×(奥)63.4×(高)53~78cm(11段階調節可能)、 [KF-840] (幅)79×(奥)58×(高)54~79cm(11段階調節可能) ●天板寸法：[KF-850] (幅)90×(奥)60cm、[KF-840] (幅)79×(奥)50cm ●楽匠プラスシリーズとリハビリテーブルの適合表				

製品コード	Hタイプ (最低床高21cm)	Xタイプ		
		脚座が超低床時 (最低床高15cm)	脚座が低床時 (最低床高21cm)	オプション脚座セット+ ハイトスパーサー (最低床高22cm)
KF-850	△	×	×	○
KF-840	△	×	○	○

※△は高さ調節機能で床高を24cm以上にすれば使用可能です。

自力で座位保持が不安定な方のリハビリテーションをサポートします。



Sittan

端座位保持テーブル				
KF-890		00170-000574	¥170,500	(税抜 ¥155,000)

●寸法：テーブル本体 (幅)68×(奥)77×(高)55~80cm(11段階調節)  
背面ユニット使用状態 (幅)68×(奥)77~95(8段階調節)×(高)91~116cm  
(テーブル高さ調節と連動)  
●天板寸法：(幅)68×(奥)48cm  
●楽匠プラスシリーズと端座位保持テーブルの適合表

Hタイプ (最低床高21cm)	Xタイプ		
	脚座が超低床時 (最低床高15cm)	脚座が低床時 (最低床高21cm)	オプション脚座セット+ ハイトスパーサー (最低床高22cm)
△	×	○	○

※△は高さ調節機能で床高を24cm以上にすれば使用可能です。

ベッドサイドレールに載せて使用できるテーブルです。



KQ-060M

オーバーテーブル				
KQ-060L	91cm幅	00170-000374	¥13,200	(税抜 ¥12,000)
KQ-060M	83cm幅	00170-000373	¥13,200	(税抜 ¥12,000)
●寸法：[KQ-060L] (幅)31×(長)99.8cm [KQ-060M] (幅)31×(長)93cm ※オーバーテーブルは3モーションシリーズには適合しません。また、ソフトカバー付ベッドサイドレールやソフトガードサイドレール、スイングアーム介助バーのグリップ部ではオーバーテーブルは使用できません。				

ベッドサイドレールに載せて使用できるテーブルです。  
91cm、83cm幅の両方のベッドに対応します。



アジャストテーブル				
KQ-090	91cm幅 83cm幅	00170-000188	¥15,400	(税抜 ¥14,000)

●寸法：(幅)32×(長)70~106.2cm  
※アジャストテーブルは3モーションシリーズには適合しません。また、ソフトカバー付ベッドサイドレールやソフトガードサイドレール、スイングアーム介助バーのグリップ部ではアジャストテーブルは使用できません。

IVポールをベッドのボードに取り付けられる専用ホルダーです。



IVポールホルダー				
KQ-PA0V		00170-001343	¥34,100	(税抜 ¥31,000)


ベッドを足側に14cm延長できます。



延長フレーム				
KQ-PA2L	91cm幅	00170-001345	¥52,800	(税抜 ¥48,000)
KQ-PA0L	83cm幅	00170-001344	¥50,600	(税抜 ¥46,000)

※非課税のベッドとセットで購入する場合に限り非課税となります。

延長フレームに載せて使用する延長部専用のマットレスです。

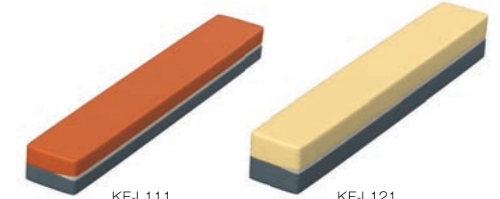

KE-L111

KE-L121

延長マットレス				
KE-L111	91cm幅 厚さ9.5cm	00170-001103	¥28,600	(税抜 ¥26,000)
KE-L121	91cm幅 厚さ12.5cm	00170-001106	¥28,600	(税抜 ¥26,000)
KE-551L	91cm幅 厚さ8cm	00170-000563	¥26,400	(税抜 ¥24,000)
KE-L113	83cm幅 厚さ9.5cm	00170-001104	¥28,600	(税抜 ¥26,000)
KE-L123	83cm幅 厚さ12.5cm	00170-001107	¥28,600	(税抜 ¥26,000)
KE-553L	83cm幅 厚さ8cm	00170-000565	¥26,400	(税抜 ¥24,000)

※非課税のベッドと延長フレームとセットで購入する場合に限り 受注生産になります。非課税となります。

## オプション



キャスター(4個セット)ストッパー付き				JIS 認証取得
KQ-P70C*1	Hタイプ用	00170-000794	¥34,100	(税抜 ¥31,000)
KQ-P90C*2	Xタイプ用	00170-000560	¥26,400	(税抜 ¥24,000)

\*1 最低床高は24cmになります。  
\*2 最低床高は15cmになります。  
※キャスターを取り付けて、**非課税**のベッドを購入する場合、ベッド本体は課税となります。



キャスター付ハイトスペーサー(4個セット)ストッパー付き				JIS 認証取得
KQ-P90CH	Xタイプ用	00170-000608	¥28,600	(税抜 ¥26,000)

※最低床高は22cmになります。  
※キャスター付きハイトスペーサーを取り付けて、**非課税**のベッドを購入する場合、ベッド本体は課税となります。

ハイトスペーサー(4個セット)				JIS 認証取得
KQ-P90H*1	Xタイプ用	00170-000561	¥4,400	(税抜 ¥4,000)
KQ-027A*2	Xタイプ用	00170-000562	¥9,680	(税抜 ¥8,800)

\*1 オプション脚座セット(KQ-PA0A)と一緒に取り付くと、最低床高は22cmになります。  
\*2 最低床高は32cmになります。  
※**非課税**のベッドとセットで購入する場合に限り**非課税**となります。



オプション脚座セット				JIS 認証取得
KQ-PA0A	Xタイプ用	00170-001342	¥5,500	(税抜 ¥5,000)

※ハイトスペーサー(KQ-P90H)を使ってベッドを高くする場合には必要です。  
※**非課税**のベッドとセットで購入する場合に限り**非課税**となります。

ゆかに敷いて使用する滑り止め用のゴムシートです。

脚座ゴムシート				
KQ-P70K	Hタイプ用	4枚(ベッド1台分)セット	¥2,420	(税抜 ¥2,200)
KQ-P732	Xタイプ用	4枚(ベッド1台分)セット	¥2,420	(税抜 ¥2,200)

※KQ-P732は、Hタイプのベッドにキャスター(KQ-P70C)を取り付けた場合にもお使いいただけます。

脚座カーベット				
KQ-P731	Xタイプ用	4枚(ベッド1台分)セット	¥4,840	(税抜 ¥4,400)

停電時もベッドを操作できる手動のハンドルです。



スマートハンドル【電動ベッド専用 手回し発電機】		
KQ-P70S		オープン価格
NN-2000		オープン価格

※故障内容によっては、スマートハンドルによる操作ができない場合があります。  
※ご本人様の体重・機種・操作部位などの条件により、操作できない場合があります。詳しくはお問い合わせください。  
楽匠プラスシリーズとスマートハンドルの適合表▶10ページ

JIS 認証取得 マークのある製品は、楽匠プラスシリーズとの組み合わせにおいてJIS認証を取得しています。

手元スイッチからの呼び出しを受信できます。  
ライトの点滅、音、振動で知らせます。



呼出受信機	
KQ-PA0J	オープン価格

●寸法(高)10.5×(幅)6×(奥)1.8cm、(質量)90g  
●ACアダプター、電源ケーブルが付属します。  
※ベッドからの家庭内呼び出し機能は、緊急時の使用を目的としたものではありません。  
※スマートフォンおよび呼出受信機と連携した各種機能はJIS認証範囲外となります。

3モーター組み換えキット			JIS 認証取得	
KQ-PA0B	2モーターシリーズ用	00170-001349	¥39,600	(税抜 ¥36,000)

※藤用モーター ユニットです。2モーターシリーズを3モーターに組み換えられます。  
※3モーター組み換えキットは楽匠プラスシリーズとの組み合わせにおいて、JIS認証を取得しています。

揺れの少ないアルミフレーム製のコードレス(充電式)タイプです。



KQ-787

床走行式電動介護リフト				
KQ-787	脚部の開閉 電動式	00170-000858	¥660,000	(非課税)
KQ-781	脚部の開閉 ペダル式	00170-000695	¥583,000	(非課税)

●寸法 [KQ-787] (全長)130×(全幅)65~102cm 安全使用荷重:205kg 質量:38kg  
[KQ-781] (全長)130×(全幅)65~106cm 安全使用荷重:205kg 質量:38kg

●楽匠プラスシリーズと床走行式電動介護リフトの適合表

Hタイプ (最低床高21cm)	Xタイプ		
	脚座が超低床時 (最低床高15cm)	脚座が低床時 (最低床高21cm)	オプション脚座セット+ ハイトスペーサー(最低床高22cm)
○	×	×	○

ご本人様の目線の高さを変えず、姿勢の変化を抑えて吊り上げられます。  
移乗側にフレームがない構造のため、  
介助する方の足元に作業スペースを確保できます。



ベッド設置式リフト エレベオ				
KQ-788L	ベッド接続ケーブル付属	00170-001544	オープン価格	(非課税)
KQ-788S	ベッド接続ケーブルなし	00170-001543	オープン価格	(非課税)

●最大利用者体重:100kg  
●寸法(全長)216×(全幅)162cm 質量:86kg

## 福祉用具貸与事業者様へ

### 業務サポート

## スマートフォン専用アプリのご案内



パラマウントベッドは福祉用具貸与事業者様専用アプリを通して、レンタル前の事務手続きから、使い方動画の閲覧、レンタル後の点検までをサポートします。  
※一部のスマートフォンでは正しく動作しない場合があります。動作確認端末はパラマウントベッドのホームページをご覧ください。

### 適切な福祉用具を選んでいただくために 福祉用具選定理由の提供

福祉用具の選定理由に関する情報を提供しています。専用アプリ内でレンタルをお考えになっている福祉用具のアイコンを選ぶと、想定される選定理由を閲覧いただけます。福祉用具サービス計画書などを作成する際に、参考資料としてお役立てください。



### 福祉用具の機能や使い方の説明に

#### ■ 使い方動画の閲覧

楽匠プラスシリーズの使い方を動画で閲覧できます。手元スイッチのボタンごとに1つの動画で説明しています。



#### ■ カタログ・取扱説明書の閲覧

最新版のカタログや取扱説明書を閲覧できます。その場で機能や使い方が確認できます。




### 福祉用具をより安全に、よりご活用いただくために モニタリング・点検サポート

楽匠プラスシリーズの目視点検項目のリストアップ、プログラムによる電気回路の自動点検、点検シートの作成をサポートするプログラムを搭載しています。メンテナンスやレポート作りにお役立てください。

#### ■ 目視点検

点検する方が項目ごとにチェックマークを入れながら点検できます。ご自身で点検項目を10項目まで追加することができます。

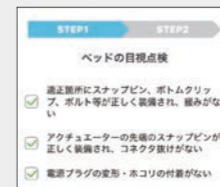

#### ■ 「ベッド点検シート」の自動作成

楽匠プラスシリーズの点検後は「ベッド点検シート」を自動作成し、ベッド点検結果やベッドの利用状況についてレポートします。点検シートをプリントすれば、ケアマネジャーやご家族への情報提供に利用できます。



#### ■ 自動点検

ベッドを自動で動かしてエラー情報などを取得します。  
※無線通信のBluetooth(ブルートゥース)への接続が必要です。



福祉用具貸与事業者様向けの専用アプリは、スマートフォンでこちらのQRコードを読み取るとダウンロードできます。アプリのダウンロードおよびご利用時には別途通信料がかかります。お客様のご負担となります。Apple IDや Google アカウントは、お客様自身でご確認ください。



※Bluetoothロゴは、米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。 ※Appleのロゴは、米国もしくはその他の国や地域におけるApple Inc.の商標です。App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。GoogleおよびGoogle Playのロゴは、Google LLCの商標です。 ※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。